

VOCO Profluorid Varnish

VOCO GmbH, Abteilung Wissenskommunikation

Anton-Flettner-Str. 1-3
D-27472 Cuxhaven

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-109

info@voco.de
www.voco.dental



Produktbeschreibung:

VOCO Profluorid Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. Es eignet sich ideal für die beschleunigte Remineralisierung und Fluoridierung der sog. Zahnhartsubstanz.

Das Varnish haftet aufgrund seiner natürlichen Kolophoniummatrix auch an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. Weiterhin ist dem Lack Xylitol beigegeben. Neben seiner geschmacksverbessernden Eigenschaft wird Xylitol eine kariostatische Wirkung zugewiesen.

Inhaltsstoffe (u.a.):

VOCO Profluorid Varnish enthält Kolophonium, künstliches Aroma, Natriumfluorid und Xylitol.

1 ml VOCO Profluorid Varnish beinhaltet 50 mg Natriumfluorid entsprechend 22,6 mg Fluorid.

Gegenanzeigen:

- VOCO Profluorid Varnish enthält Kolophonium und künstliches Aroma. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen Inhaltsstoffe von VOCO Profluorid Varnish ist auf die Anwendung zu verzichten.
- VOCO Profluorid Varnish ist nicht anzuwenden bei Patienten mit ulzerierenden Zahnfleisch- oder Mundschleimhautentzündungen.
- VOCO Profluorid Varnish ist nicht für die systemische Behandlung bestimmt.

Patientenzielgruppe:

VOCO Profluorid Varnish kann für alle Patienten ohne Einschränkung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts angewendet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts:

Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung und den einschlägigen Produktnormen.

Anwendung:

Die Anwendung von VOCO Profluorid Varnish erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Empfohlene Dosis:

- Behandlung von Patienten mit Milchgebiss ca. 0,25 ml VOCO Profluorid Varnish
- Behandlung von Patienten mit Wechselgebiss oder bleibendem Gebiss ca. 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish

Einen dünnen Film VOCO Profluorid Varnish auf die Zahnhartsubstanz auftragen. Ein dicker Film löst sich leicht ab und bietet keine therapeutischen Vorteile.

Vorbereitung:

Behandlungsfläche gründlich von Zahnstein reinigen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte überschüssige Flüssigkeit bzw. Speichel von der zu behandelnden Oberfläche entfernt werden.

Applikation:

VOCO Profluorid Varnish gleichmäßig auftragen, so dass die komplette Oberfläche mit einem dünnen Film bedeckt ist. Anwendungsbereich befeuchten (entweder durch leichte Spülung oder durch natürlichen Speichelfluss), um eine Abbindung von VOCO Profluorid Varnish zu gewährleisten.

Hinweise / Vorsichtsmaßnahmen:

- Patienten müssen darauf hingewiesen werden, 4 Stunden nach der Behandlung feste Nahrung, Alkohol, das Reinigen der Zähne sowie das Benutzen von Zahnseide zu vermeiden.
- Selten wurde über ödematöse Schwellungen, besonders nach Anwendung auf größeren Oberflächen, berichtet.
- Bei vergleichbaren Präparaten wurde sehr selten über Atemnot bei Kindern mit Asthma berichtet.
- Bei Patienten mit empfindlichem Verdauungssystem kann nach umfangreicher Behandlung Übelkeit auftreten.
- Bei Überempfindlichkeit: Lack mit weicher Zahnbürste und Zahnseide entfernen, anschließend mit warmem Wasser spülen.
- Am Tag der Behandlung keine weiteren Anwendungen mit fluoridhaltigen Präparaten vornehmen.
- Die Einnahme von Fluoridtabletten nach Behandlung mit VOCO Profluorid Varnish einige Tage aussetzen.
- Lack nicht verschlucken.

Lagerung:

Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Entsorgung des Produkts gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.